

icoone®

РЕЗУЛЬТАТЫ ICOONE  
Фотографии до и после



## РЕЗУЛЬТАТЫ ICOONE: ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ

Результаты говорят сами за себя и являются самым важным доказательством эффективности icoone. По этой причине мы убедительно просим вас уделять особое внимание и следовать указаниям, описанным ниже, при съемке фотографий «до и после». Присылайте фотографии нам: лучшие из них будут опубликованы на наших официальных каналах с ссылками на ваши страницы!

Прежде всего, убедитесь, что ваши пациенты / клиенты подписывают свое согласие на использование изображений.

Чтобы сделать снимки хорошего качества, вам понадобятся следующее:

- измерительная сетка icoone в качестве фона
- напольный измерительный стикер
- штатив (который должен располагаться на уровне живота пациента в случае результатов по телу или на уровне лица для результатов по лицу, соответственно)
- камера высокого разрешения.

Фотографии должны быть сделаны в соответствии со следующими стандартами:


- Фотографии должны отражать эволюцию результатов, поэтому их следует делать перед началом первого сеанса, в середине и в конце курса процедур.
- На ифотографиях во время различных этапов убедитесь, что пациент / клиент всегда стоит в одном и том же положении (анфас, в профиль или сзади) и что расстояние между пациентом / клиентом и камерой всегда одинаково.
- Пациент / клиент должен быть раздетым, в нейтральном нижнем белье или в нижнем белье, идущем в комплекте с костюмом
- Делайте каждый снимок дважды, если первая фотосессия окажется недостаточно хороша для использования.
- Обратите внимание на свет, лучше, чтобы тени не закрывали фигуру.
- Обратите внимание на масштаб, использованный при съемке первых снимков, чтобы вы могли воспроизвести его на следующих. Настройка масштабирования должна быть одинаковой для всех фотосессий.
- У пациента не должно быть крема / масла на теле, макияжа на лице.

## ФОТОГРАФИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР ПО ТЕЛУ

На фотографиях должно быть изображено все тело, за исключением головы ( в следующих положениях:

- Спереди;
- Сзади;
- Правый профиль;
- Левый профиль;
- Приближенные фотографии проблемных участков.

Мы рекомендуем пациентам / клиентам стоять в правильном положении, а именно: руки касаются плеч, чтобы образовать угол 90 ° с телом. Главное, чтобы руки не были расположены вдоль тела.

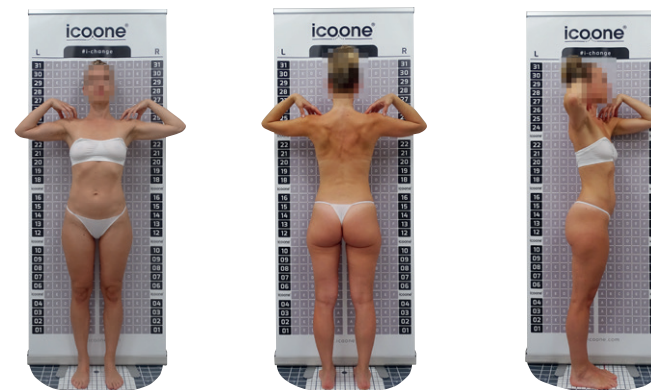

## ФОТОГРАФИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР ПО ЛИЦУ

Пациент / клиент должен находиться сидя с закрытыми глазами и положить подбородок на опору. Если у вас нет опоры : попросите пациента / клиента сесть ровно и опереться на спинку стула, держать голову прямо. Следуйте этим же инструкциям, чтобы сделать фотографии зоны шеи.

На фотографиях должно быть представлено все лицо в следующих положениях:

- Анфас
- Правый профиль
- Левый профиль
- Приближенные фотографии проблемных участков

**i-Tech<sup>®</sup>**  
**INDUSTRIES**  
The Science of Skin

Меди Спа Техноложди -  
эксклюзивный дистрибьютор на  
территории России  
8 495 741 75 04

[www.medispatechnology.ru](http://www.medispatechnology.ru)  
[www.iconelaser.ru](http://www.iconelaser.ru)